

# instructies voor gebruik eswab

**Gebruik eswab: bij een bacteriologische kweek, een schimmelkweek en PCR-bepalingen**

De eswab is een voor microbiologisch onderzoek bestemde wattenstok met een vloeibaar transportmedium. De stokjes zijn voorzien van een breekpunt. Het gebruik van deze stok zorgt ervoor dat het afgenomen materiaal in verhoogde mate wordt afgegeven aan het transportmedium (elute, vandaar de naam eswab). Daarnaast is de eswab universeel toepasbaar, dus ook voor viruskweken of moleculair onderzoek naar bijvoorbeeld Herpes simplex of Varicella zoster. De eswab kunt u echter **niet gebruiken** voor het aanvragen van moleculaire SOA-diagnostiek.

Vraagt u ander onderzoek aan? Raadpleegt u dan het inzendschema voor het juiste afnamemateriaal op de website [www.nwz.nl/protocol](http://www.nwz.nl/protocol) en ga dan naar 'inzendschema medische microbiologie'.

## Wat zit er in de gele envelop?



eswab met **roze dop**

absorptievel

safetybag

## Instructies voor het gebruik van de eswab

1. Open de verpakking volgens onderstaand schema
2. Draai de dop van de buis en neem met de eswab het materiaal af bij de patiënt.  
**Let op!: raak het deel van de eswab onder de rode markering niet aan bij het verzamelen van het materiaal en bij het terugplaatsen in de buis.**
3. Breng de eswab in de buis en breek vervolgens de eswab af op het breekpunt dat is gemarkeerd met een rode lijn. Gooi het overgebleven stokje weg in de container voor medisch afval
4. Draai de dop weer terug op de buis
5. Noteer de patiëntengegevens op de buis
6. Doe het buisje samen met het absorptievel in de safetybag
7. Sluit de safetybag en doe deze met het ingevulde aanvraagformulier in de gele envelop
8. Bied het materiaal bij voorkeur dezelfde werkdag aan voor transport naar het laboratorium

